

## ► Was ist ein Defibrillator?

Ein Defibrillator, kurz Defi genannt, ist ein Hilfsmittel, das bei einem plötzlichen Herztod auch von Personen ohne medizinische Kenntnisse eingesetzt werden kann.

Das Gerät erkennt selbstständig lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen und gibt nur dann einen Schock frei, wenn dieser notwendig ist.

## ► Wann hilft ein Defibrillator?

Wir alle können in eine Situation kommen, in der unsere Hilfe Leben retten kann. Um schnelle Hilfe bei der Wiederbelebung zu ermöglichen, gibt es in Eckental in allen Ortsteilen für den Notfall Defibrillatoren.

## ► Wo finde ich einen Defibrillator?

Die öffentlich zugänglichen Defibrillatoren (siehe Innenseite) werden in Wandkästen aufbewahrt, die sich jederzeit öffnen lassen. So kann der Defibrillator im Notfall von jedem/r Helfer/in mitgenommen und zum Patienten gebracht werden.

**Ist ein Zweithelfer vor Ort: Defibrillator holen lassen.**

**Wichtig** Der Defibrillator ersetzt nicht die Herzdruckmassage!

Diese darf keinesfalls durch das Herbeiholen eines Defibrillators verzögert oder unterbrochen werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  
Sylvia Steinbach, Tel.: 09126-903241  
E-Mail: sylvia.steinbach@eckental.de



## ► Wie nutze ich einen Defibrillator?

Das Gerät ist kinderleicht zu bedienen. Folgen Sie den einfachen **Sprachanweisungen** des Gerätes.




1. Deckel des Gerätes öffnen.
2. Oberkörper des Patienten vollständig freimachen.
3. Roten Handgriff ziehen, um Elektroden-Abdeckung zu entfernen.



4. Elektroden entnehmen und am Patienten befestigen. Bilder auf den Klebeelektroden beachten.



5. Elektroden wie auf den Bildern gezeigt fest auf die nackte Haut des Patienten kleben. Immer den Anweisungen des Gerätes folgen.

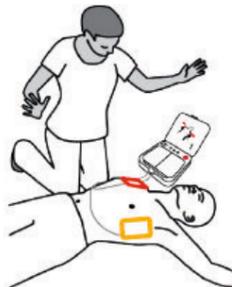

Der Defibrillator prüft selbstständig, ob eine Schockabgabe nötig ist. Wenn die Anweisung „**ZURÜCKTRETEN**“ zu hören ist, darf der Patient nicht berührt werden. Der Schock wird abgegeben. Nach Schockauslösung sofort die **Herzdruckmassage** fortführen bis der Rettungsdienst eintrifft oder der Patient wieder reagiert.

Ein Video zur Handhabung eines Defibrillators finden Sie unter

► <https://www.eckental.de>  
Stichwort: Defibrillator



# MARKT ECKENTAL



## Leben retten mit dem Defibrillator



... Wie Sie im Notfall damit eine Wiederbelebung durchführen können!



## Erste Hilfe - Was tun im Notfall?

### 1. Prüfen

Sprechen Sie den betroffenen Patienten laut an. Wenn der Patient nicht reagiert und kaum oder gar nicht atmet, dann...



### 2. Rufen

Rettungsdienst unter der Nummer 112 rufen, dann...




### 3. Drücken

Beginnen Sie sofort mit der **Herzdruckmassage**:

Legen Sie beide Hände übereinander auf die Mitte des Brustkorbs des Patienten. Drücken Sie kräftig und schnell auf das Brustbein.

ca. 5 cm tief

100-120 pro Min.

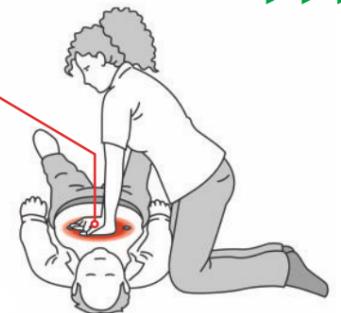

Weitere Informationen unter  
► <https://www.wiederbelebung.de/infothek/>





## Standorte der (Defis) Defibrillatoren in Eckental\*

- 1 Benzendorf**  
Feuerwehrhaus Benzendorf  
Benzendr. 11
- 2 Brand**  
Feuerwehrhaus Brand  
Brander Hauptstr. 12a
- 3 Ebach**  
Feuerwehrhaus Mausgesees-Ebach  
Ebacher Hauptstr. 1

- 4 Eckenhaid**  
Feuerwehrhaus Eckenhaid  
Heidestr. 11
- 5 Eschenau**  
Hort an der Grundschule Eschenau  
Pfarrgarten 7
- 6 Eschenau**  
Rathaus Eschenau  
Rathausplatz 1
- 7 Forth**  
Feuerwehrhaus Forth  
Martin-Luther-Str. 10

- 8 Frohnhof**  
Feuerwehrhaus Frohnhof  
Rothenbergstr. 2b
- 9 Herpersdorf**  
Feuerwehrhaus Herpersdorf  
Büttnerstr. 1
- 10 Herpersdorf**  
Sportplatz ASV Herpersdorf  
Försterstr. 1
- 11 Illhof**  
Campingplatz Bergesruh  
Illhof 3

- 12 Mausgesees**  
Bei der Bushaltestelle  
Mausgesees 4b
- 13 Oberschöllnbach**  
Feuerwehrhaus Oberschöllnbach  
Lechstr. 6
- 14 Oedhof**  
Gasthof zum Geißberg  
Oedhof 6
- 15 Unterschöllnbach**  
Feuerwehrgerätehaus  
Aurachstr.

\* alle 15 Defibrillatoren sind  
öffentlich zugänglich

Herzliches Dankeschön  
an die Sponsoren und Unterstützer

Sparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach  
Sparkasse Forchheim  
Vereinigten Raiffeisenbanken  
Bayerisches Rotes Kreuz

Quellenangabe

Karte mit freundlicher Genehmigung  
von © Grafik Werkstatt Leon

